
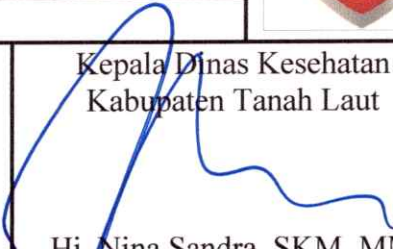
	PENGUNAAN STETOSKOP				
	SOP	No. Dokumen : 440/006/PSC.YANKES/2020			
		No.Revisi : 00			
		Tanggal Terbit : 23 januari 2020			
	Halaman :				
Public Safety Center 119 DINKES TALA				<p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut</p> <p> <u>Hj. Nina Sandra, SKM.,MM</u> NIP. 19640710 198511 2 002</p>	
Pengertian	Sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh,alat ini digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernafasan .				
Tujuan	Untuk melakukan pemeriksaan suara dalam tubuh.				
Kebijakan					
Referensi	Depkes RI 2005, Depkes RI 2007, Depkes RI 2012				
Prosedur	<p>Peralatan :</p> <p>1. Stetoscope</p> <p>Langkah-Langkah :</p> <p>1. Petugas mencuci tangan</p> <p>2. Petugas mendekatkan alat ke samping pasien</p> <p>3. Petugas menaruh ujung stetoskop ke dua telinga</p> <p>4. Diafragma ditaruh di dada jika ingin mendengarkan suara nafas atau irama jantung</p> <p>5. Diafragma ditaruh di perut jika ingin mendengarkan bising usus</p> <p>6. Diafragram ditaruh di nadi brakialis jika ingin mengukur tekanan darah</p> <p>7. Petugas mengusap lapisan diafragma dengan kapas alcohol jika setiap tindakan selesai</p> <p>8. Petugas merapikan alat dan cuci tangan</p>				
Unit Terkait	1. Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Laut 2. Ambulan PSC 119 DINKES TALA				
Dokumen Terkait	1. Buku Laporan Pelayanan 2. Catatan Tindakan				
Rekaman Histori Perubahan	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl diberlakukan	